

# BIRILLO




 *design and quality*  
**MADE IN ITALY since 1980**

**ORMESA**<sup>®</sup>



Tutte le misure sono riconducibili ai seguenti **Codici ISO** indicativi:  
12.06.09.006 + 12.06.09.106 + 12.06.09.109 + 12.06.09.112 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142  
Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici con n. 158208/R

## M I S U R E

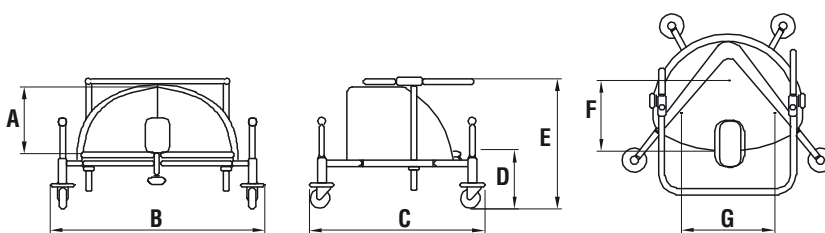

I NUMERI SEPARATI DA UN TRATTINO INDICANO UNA REGOLAZIONE MINIMA E UNA REGOLAZIONE MASSIMA.

Mis.	Portata massima	Peso ausilio	Ingombro max	A	B	C	D	E	F	G
1	kg 30	kg 8,5	cm 67	cm 18	cm 59	cm 50	cm 19-27	cm 36-50	cm 18	cm 22
2	kg 40	kg 10	cm 73	cm 19	cm 65	cm 51	cm 22-30	cm 40-56	cm 20	cm 26
3	kg 50	kg 11	cm 81	cm 21	cm 73	cm 59	cm 22-34	cm 42-62	cm 23	cm 30
4	kg 60	kg 12,8	cm 89	cm 28	cm 78	cm 60	cm 22-40	cm 50-76	cm 30	cm 38

## A C C E S S O R I



**860 - poggiatesta** concavo regolabile in altezza



**824 - tavolo trasparente** con incavo

Ric. al **Cod. ISO** indicativo 12.06.09.136

### Caratteristiche tecniche e funzioni

- **telaio** in acciaio, regolabile in altezza, verniciato con polveri epossidiche atossiche;
- **tappetzeria** autoestinguente;
- **seduta** imbottita, rivestita con materiale plastico resistente all'uso e alla pulizia;
- **ruote** piene piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a sfera, protette da paracolpi elastici;
- **manubrio** regolabile in altezza e profondità.

**BIRILLO** è un ausilio pensato e realizzato per permettere lo spostamento autonomo e precoce in posizione seduta a bambini dai 2 agli 8 anni. **La tappetzeria è autoestinguente. La forma triangolare della seduta** impedisce l'eccessiva estensione delle anche e del tronco e consente l'allineamento tra capo e busto, favorendo l'impostazione di una postura corretta e l'impulso motorio del bambino. Il cuneo divaricatore trattiene il bacino nella seduta triangolare. **La postura** stimola la gestione del movimento con le braccia e la rotazione del tronco.

**BIRILLO**, per la forma ed il colore, è **accettato come un "giocattolo"** e ciò lo predispone ad un uso sereno, senza paure, **stimolando la curiosità di esplorare l'ambiente circostante**. Per questo, **BIRILLO** svolge un ruolo importantissimo nello **sviluppo delle funzioni percettive e visivo-motorie del bambino**, indispensabili per la conoscenza e la rappresentazione dello spazio.

Rivenditore Autorizzato

PRODOTTO TESTATO  
**TÜV** BERLINO

PRODOTTO MARCATO  
**CE**

PRODOTTO REGISTRATO  
**FDA** USA

**ORMESA** s.r.l.  
Via A. Da Sangallo, 1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY  
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637  
info@ormesa.com-www.ormesa.com



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV**  
**= ISO 9001 =**