



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**GRILLO** chair



# GRILLO chair

## Una sedia per mille attività.

**Grillo Chair** è una **sedia ergonomica** e **regolabile** indicata per bambini con disabilità che necessitano di un supporto durante lo svolgimento di attività ricreative, didattiche e della vita quotidiana.

È una **seduta dal design ergonomico** studiata per garantire **massimo comfort** al bambino che, migliorando la postura seduta, è incentivato a sviluppare le capacità motorie e di coordinazione oculo manuale, l'attenzione e quindi l'inclusione sociale.

La **tappezzeria portante, estremamente traspirante e resistente**, permette al bambino di vivere un'**esperienza di seduta gratificante** e libera da fastidi. Disponibile nei colori rosa e blu.

Grazie ad un'ampia gamma di componenti posturali **Grillo Chair è facilmente adattabile**, riuscendo a soddisfare le esigenze di ogni bambino. In classe e a casa **il bambino si sentirà al sicuro** e ciò lo aiuterà nelle varie attività e nel rapporto con i suoi pari.

PRODOTTO  
MARCATO 

GRILLO CHAIR è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



# Abbinamento perfetto

## Stabilità, postura e praticità



**Grillo Chair ha una struttura compatta** di alluminio, verniciata con polveri epossidiche atossiche.

Il **sistema di regolazione in altezza** tramite molle a gas consente di modificare l'altezza della sedia anche con il bambino seduto.

Il **sistema di sicurezza impedisce l'azionamento involontario**.

**Grillo Chair è la soluzione ideale per la scuola e per la casa:** può essere abbinata a qualsiasi superficie per attività didattiche e ludiche o a tavoli polifunzionali come il **Tavolo Multifunzione di Ormesa**, creando un **match perfetto tra stabilità, postura e praticità**.

# Tappezzeria smart

## Rivestimento all'avanguardia

La tappezzeria di Grillo Chair ha una struttura all'avanguardia a **nido d'ape**, quindi **estremamente traspirante a contatto con la pelle**. La struttura del tessuto crea una "camera d'aria" che consente sia la **circolazione dell'aria per una massima traspirazione**, sia un **isolamento termico naturale** efficace.

### Il doppio strato è garanzia di:

- > **Igiene:** grazie all'eccellente traspirabilità, riduce la sudorazione e la formazione dei batteri.
- > **Lavaggio:** la composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio, nonostante non sia estraibile.
- > **Asciugatura rapida.**
- > **Resistenza:** Alta resistenza all'abrasione. La trama ad elevata resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test ISO 12947).
- > **Ignifugità** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.



# Caratteristiche tecniche e regolazioni





## Schienale

Reclinabile in maniera semplice e sicura con le due levette verdi. Regolabile in altezza a scorrimento in modo semplice, senza il rischio di perdere la vite.



## Seduta

Ergonomica e leggermente basculata per impedire lo scivolamento del bacino e garantire maggior comfort. Regolabile in profondità a scorrimento in maniera continua e precisa. Regolabile in larghezza tramite componente opzionale 958R pelotte al bacino multiregolabili.



## Braccioli


morbidi, regolabili in altezza ed inclinazione.

# Componenti




**947 Cintura pelvica ad angolo variabile**

Disponibile in tre misure.

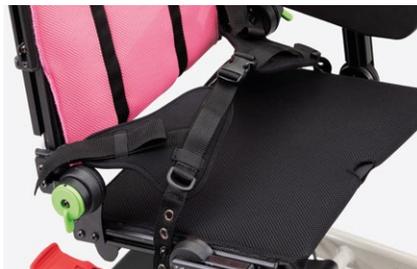


**920 Cintura pelvica a quattro punti**

Disponibile in due misure.

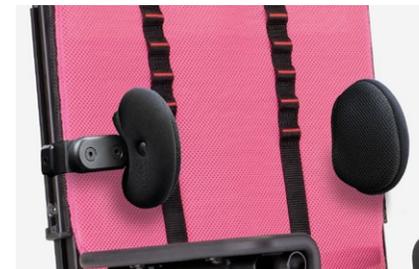

**838 Pelotte toracali**

regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibili in due misure.

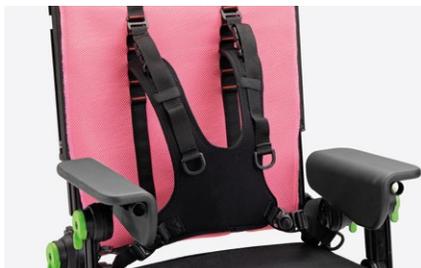


**853 Pettorina a bretellaggio**

Disponibile in due misure.



**853 slim Pettorina sagomata a quattro punti**

Solo per sedia misura Medium.

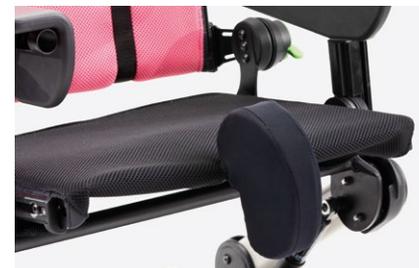

**834N Divaricatore imbottito**

Disponibile in due misure.

# Componenti



## 958R Pelotte al bacino multiregolabili

Regolabili in larghezza, rotazione e profondità.



## 824 Tavolo con incavo avvolgente

Regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.

*Costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli che non intrappola residui di cibo.*



## 823 Prolunga schienale

Per il supporto del capo.



## 835 Poggiatesta sagomato

con contenimento laterale ed occipitale, regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.



## 865 Poggiatesta imbottito

regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.



## 959 Set di 4 ruote con freno.


In alternativa ai 4 piedini neri di appoggio. Ruote piroettanti da 75 mm dotate tutte di freno di stazionamento.

**Fornite con pedana appoggiapiedi.**

*Per un facile trasporto e stoccaggio. Consente il trasferimento anche con il bambino seduto.*

# Grillo Chair

## misure e pesi

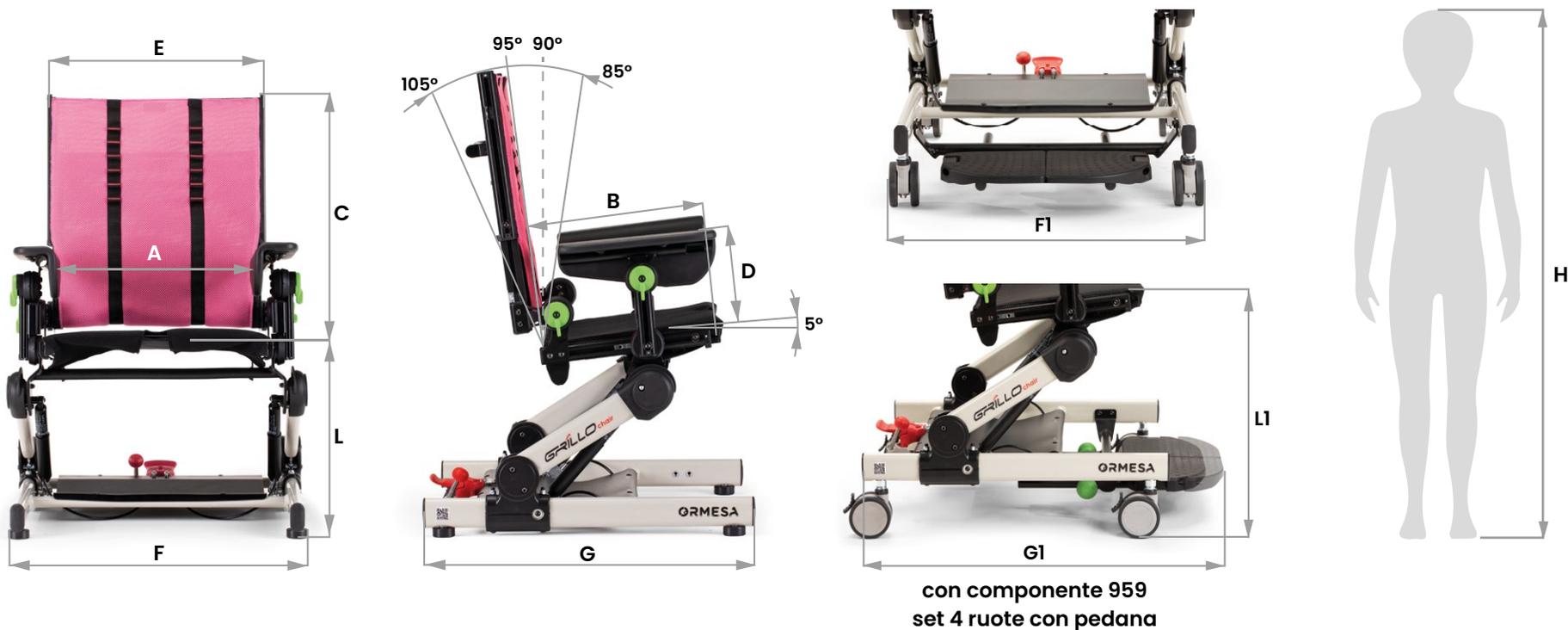


	A*	B	C	D	E	F	F1	G	G1	L	L1	H	Peso Ausilio	Portata Massima
Small	30 cm	20-30 cm	30-45 cm	15-18 cm	36 cm	48 cm	50,5 cm	50 cm	52-64 cm	20-31 cm	28-39 cm	90-120 cm	10,7 kg	35 kg
Medium	35 cm	28-43 cm	35-55 cm	16-20 cm	41 cm	52 cm	54,5 cm	56,5 cm	62-73 cm	25-40 cm	33-48 cm	110-145 cm	13 kg	45 kg

\* Con componente 958R pelotte al bacino multiregolabili: misura SMALL 20-30 cm; misura MEDIUM 25-35 cm

Si ringrazia la Scuola dell'Infanzia di Sterpete per la collaborazione e l'ospitalità.



Giulio e la sua storia vi aspettano nel sito ufficiale di Ormesa, assieme agli altri protagonisti della nostra fantastica community globale.

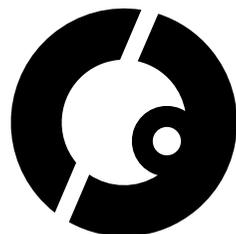

**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno  
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.  
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo  
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= **ISO 13485** =

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**