



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**MINI STANDY**



# MINI STANDY

## Il tuo sostegno quotidiano.

**Mini Standy è uno stabilizzatore per bambini o ragazzi** che non sono in grado di mantenere in maniera autonoma la posizione eretta e necessitano di un sostegno.

**Mini Standy contiene senza costringere ed è disponibile in tre misure.**



PRODOTTO  
MARCATO **CE**

MINI STANDY è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



**Caratteristiche  
tecniche e regolazioni**



## Telaio

senza sporgenze. Più sicurezza, rotazione del tronco e libertà di movimento degli arti superiori facilitate. Regolabile in altezza con sistema "bloccaggio sicuro".



## Tools free

regolazioni senza l'utilizzo di attrezzi ma tramite speciali pomelli, disegnati da Ormesa, con presa efficace e sicura. I pomelli mantengono efficacemente il serraggio attraverso un meccanismo interno che non segna e rovina il tubo.



## Barre numerate




per ripristinare l'assetto posturale scelto dal terapeuta.



# Supporto pelvico e supporto toracico

**regolabili in modo indipendente** in circonferenza, in rotazione, in altezza e in antero-posteriore. In caso di sufficiente controllo del tronco è possibile rimuovere il supporto toracico.



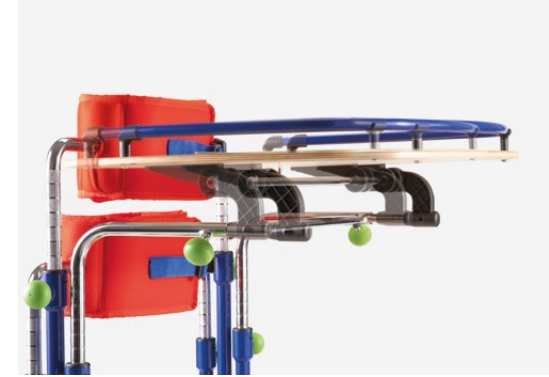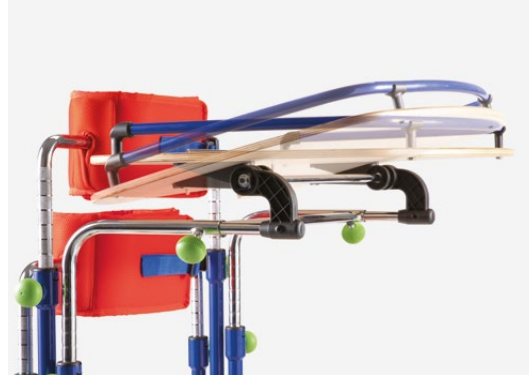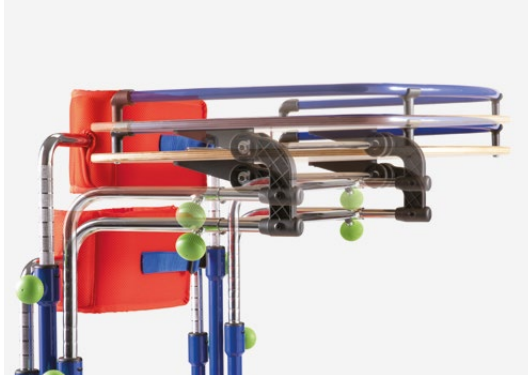

# Tavolo in legno multistrato di betulla

progettato per l'attività didattica e per il sostegno degli arti superiori, può essere rimosso per facilitare le attività di riabilitazione. Regolabile in altezza, inclinazione e in antero-posteriore.



# Sostegni per le ginocchia

imbottiti, tappezzeria removibile per il lavaggio e con foro per scarico rotuleo. Regolabili in modo indipendente in altezza, in senso antero-posteriore, in rotazione e abduzione.



## Fermatalloni

regolabili in larghezza e profondità.



## Pedana in legno multistrato di betulla

riferimento ampio e sicuro.




## Ruote gemellate piene

diametro 75 mm, posteriori con freni. Le ruote consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra anche durante l'utilizzo.






# Componenti

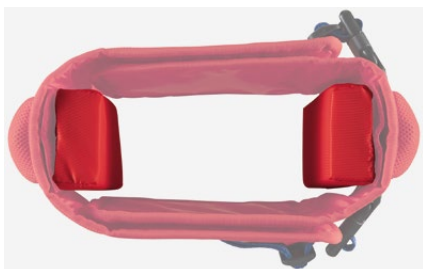

**944 Riduttori di circonferenza**  
possibilità di stringere la circonferenza dei supporti per gli utenti più magri, inserendo gli appositi riduttori (spessore 3 cm cadauno).

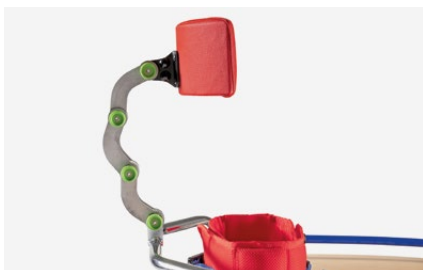

**865 Poggiatesta multiregolabile**  
regolabile in altezza, inclinazione e in antero-posteriore tramite pomelli.





# Mini Standy **misure e pesi**

A: ingombro della base  
 B: ingombro in lunghezza  
 C: altezza pedana - tavolo  
 D\*: ingombro in larghezza  
 E: altezza pedana - ginocchiere  
 F: altezza pedana - supporto pelvico  
 G: altezza pedana - supporto toracico  
 L: circonferenza minima supporti  
 M\*\*: larghezza interna supporti  
 N: altezza utente  
 Peso Ausilio  
 Portata Massima

## misura 1


60 cm  
 da 74 a 86 cm  
 da 49 a 77 cm  
 64 cm  
 da 14 a 26 cm  
 da 41 a 55 cm  
 da 53 a 72 cm  
 60 cm  
 18 cm  
 da 75 a 100 cm  
 19 kg  
 35 kg

## misura 2


70 cm  
 da 78 a 90 cm  
 da 59 a 87 cm  
 65 cm  
 da 14 a 32 cm  
 da 52 a 68 cm  
 da 67 a 94 cm  
 65 cm  
 22 cm  
 da 95 a 125 cm  
 21 kg  
 45 kg

## misura 3


80 cm  
 da 83 a 95 cm  
 da 69 a 100 cm  
 70 cm  
 da 14 a 42 cm  
 da 62 a 86 cm  
 da 82 a 110 cm  
 70 cm  
 29 cm  
 da 120 a 150 cm  
 23 kg  
 55 kg

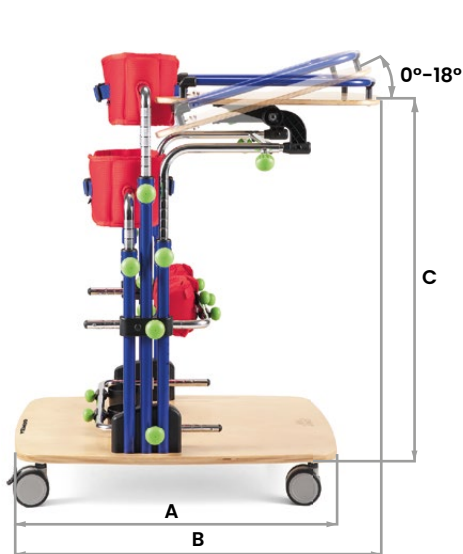

\*nella misura 1 il maggior ingombro è dato dal tavolo. Nelle misure 2 e 3 è dato dai pomelli.

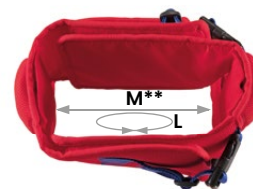

\*\*distanza da considerare con le aste allineate.

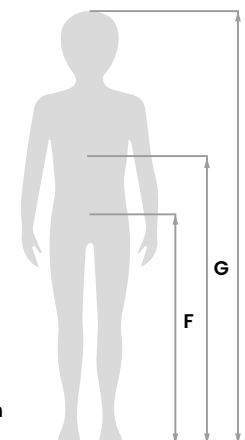


Assicurarsi che le altezze F e G rappresentate in figura, rientrino nel range di misura indicato per il supporto pelvico e toracico.







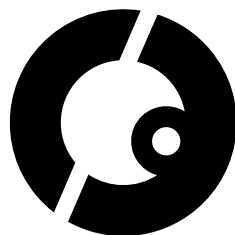

**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno  
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.  
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo  
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= **ISO 13485** =

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**