



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**Trollino**



**Adatto  
ad ogni  
contesto**





# Trollino

## Stabilità, praticità e comfort: tutto in uno.

Il **Trollino** di Ormesa è un **passsegino per bambini e ragazzi** compatto e leggero, l'ideale per spostarsi in ogni contesto.

È facile da gestire grazie al **sistema brevettato a livello internazionale** che permette di **chiuderlo con una sola manovra**. Chiudendolo non aumenta la sua lunghezza, **occupando il minimo ingombro**.

Il Trollino ha una **struttura stabile e resistente** garantita dalla **doppia crociera** posizionata dietro lo schienale e sotto la seduta che conferisce maggiore stabilità e comfort.

La **tappezzeria** è **realizzata con materiali tecnologici all'avanguardia**: è estremamente **traspirante, resistente, facilmente lavabile, ignifuga**. Disponibile in **quattro colori**: rosso, blu, rosa e nero.

Grazie a un'**ampia gamma di componenti disponibili**, risponde facilmente ad ogni esigenza.



**Trollino ha superato il CRASH TEST** secondo le norme **ISO 7176/19** e **ANSI RESNA WC/19**.

PRODOTTO  
MARCATO 

TROLLINO è un **DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA** definiti dal **REGOLAMENTO (UE) 2017/745**



# Pratico e leggero

## Si adatta al tuo stile di vita dinamico

Il **Trollino** è dotato di un **telaio pieghevole** in alluminio, verniciato con polveri epossidiche atossiche.

**Una volta chiuso rimane compatto:** questo permette di **trasportarlo** sulle ruote posteriori **come fosse un trolley da viaggio**.

Il suo **peso ridotto** e la **semplicità di chiusura**, rende semplice qualsiasi sollevamento o spostamento: perfetto se hai bisogno di riporlo nella macchina o di prendere i mezzi pubblici. Le **ruote si adattano ad ogni tipo di terreno** offrendo massimo comfort sia alla mamma che al bambino. È così maneggevole che **si spinge anche con una sola mano**.

**Trollino** è la **soluzione ideale** per le famiglie dinamiche spesso in viaggio e che sono alla ricerca di **stabilità, praticità e comfort, tutto in uno!**





# Tappezzeria smart

## Rivestimento all'avanguardia

La tappezzeria del Trollino ha una struttura all'avanguardia a **nido d'ape**, quindi **estremamente traspirante a contatto con la pelle**. La struttura del tessuto crea una "camera d'aria" che consente sia la **circolazione dell'aria per una massima traspirazione**, sia un **isolamento termico naturale** efficace.

### Il doppio strato è garanzia di:

> **Igiene:** grazie all'eccellente traspirabilità, riduce la sudorazione e la formazione dei batteri.

> **Lavaggio:** nonostante non sia estraibile, la composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio.

> **Tempi di asciugatura rapidi.**



> **Resistenza:** Alta resistenza all'abrasione. La trama ad elevata resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test ISO 12947).

> **Ignifugicità** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.





**Scegli il tuo stile:** quattro div

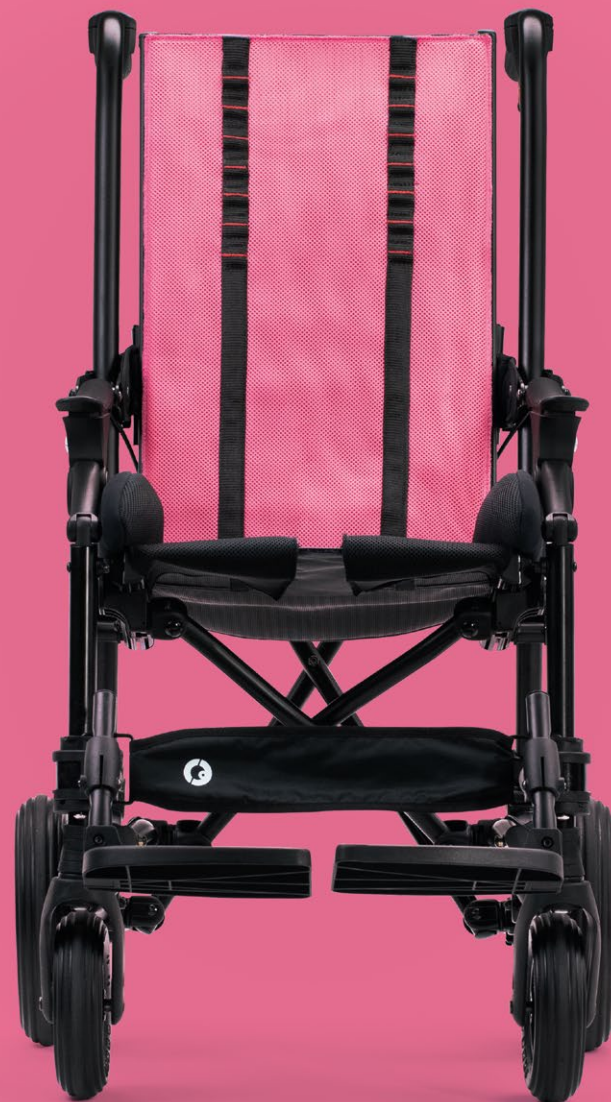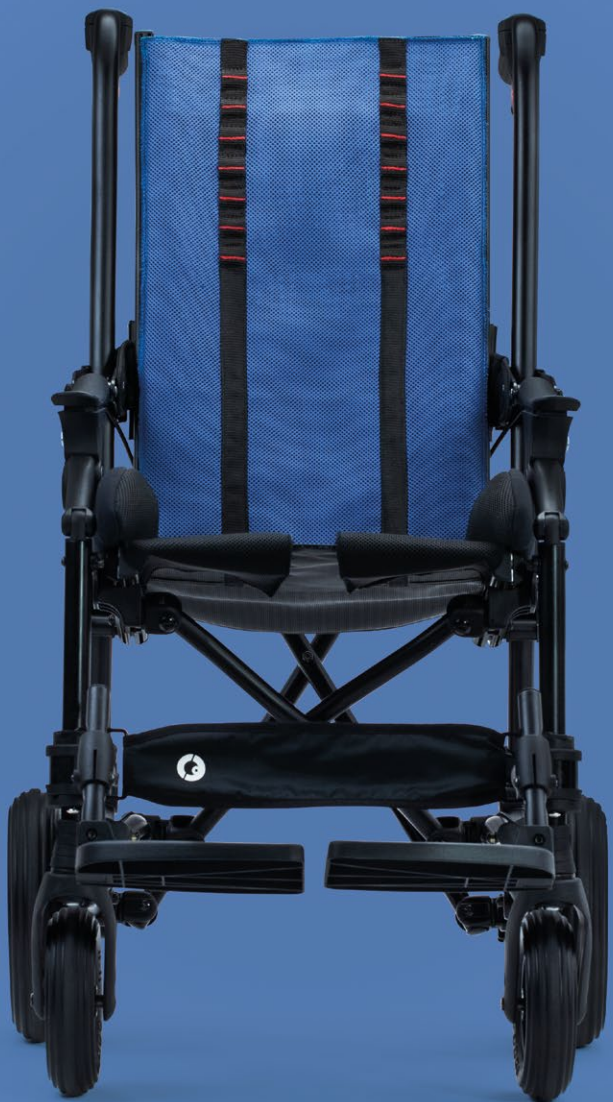

erse colorazioni per ogni personalità



# Caratteristiche tecniche e regolazioni



## Schienale

Reclinabile su tre posizioni. Regolabile in altezza a scorrimento in modo semplice, senza il rischio di perdere la vite. Presente sul retro la borsetta per riporre il manuale e la chiave in dotazione. La crociera posteriore garantisce stabilità, comfort e resistenza.



## Seduta

Ergonomica e leggermente basculata per impedire lo scivolamento del bacino e garantire maggior comfort. Regolabile in profondità a scorrimento e in larghezza tramite pelotte al bacino imbottite. Regolazione semplice senza il rischio di perdere la vite. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.





## Maniglie

di spinta con freni manuali e di stazionamento. Utilissime per gestire il passeggino nei diversi contesti. Regolazione in altezza con componente 951.



## Poggiagambe

regolabile in altezza

## Pedane

ribaltabili e girevoli in linea con il telaio senza ingombro. Regolazione in inclinazione con componente 956.

Presente anche la fascia poggia polpacci per un maggiore comfort.



## Ruote

con profilo originale "**Ormese Design**". Imperforabili, leggere e **adatte a tutti i tipi di terreni**.

**Ruote anteriori:** piene, piroettanti da 7" (17 cm).

**Ruote posteriori:** piene da 10" (25 cm), con **freni indipendenti a tamburo**.

**Leva di superamento gradini** su entrambe le ruote posteriori.



# Componenti

## L'importanza di una seduta ergonomica

Per noi **comfort ed ergonomia sono valori irrinunciabili:**

Trollino non solo fa sentire gli utenti sicuri ed estremamente comodi ma contribuisce ad offrire una postura ottimale e stabile nelle circostanze più disparate.

Dallo schienale alla seduta, passando per i poggiatesta e le pelotte toracali, **ogni elemento di Trollino è regolabile in maniera semplice e intuitiva.** Inoltre, con il suo set di componenti disponibili, offre possibilità di adattamento e comfort senza limiti.

Facili da applicare e rimuovere, maneggevoli e resistenti, i componenti di Trollino sono progettati nei minimi dettagli.

**Il sistema brevettato a livello internazionale** permette di **chiuderlo** con una sola manovra anche **con i componenti montati** per **garantire un'esperienza di utilizzo pienamente soddisfacente.**



# Componenti



**835 Poggiatesta contenitivo e sagomato**  
regolabile in altezza.



**865 Poggiatesta imbottito**  
regolabile in altezza.



**838 Pelotte toracali**  
regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibile in due misure.




**868 Pelotte frontali flessibili e avvolgenti per il tronco.**  
regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.




**947 Cintura pelvica ad angolo variabile**  
Disponibile in due misure.



**920 Cintura pelvica a quattro punti**  
Disponibile in due misure.

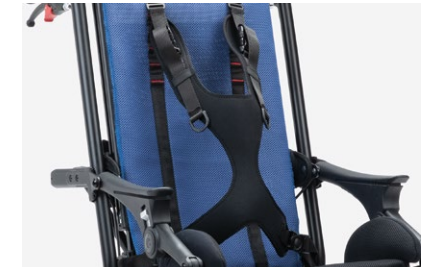

**853 slim Pettorina sagomata a quattro punti**

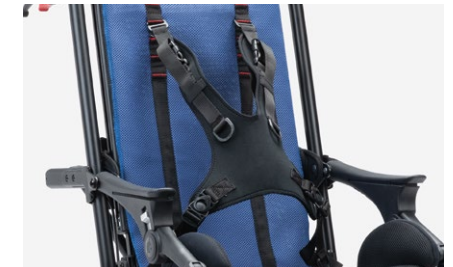


**853 Pettorina a bretellaggio**  
Disponibile in due misure.

# Componenti



**834N Divaricatore imbottito**  
estraibile.

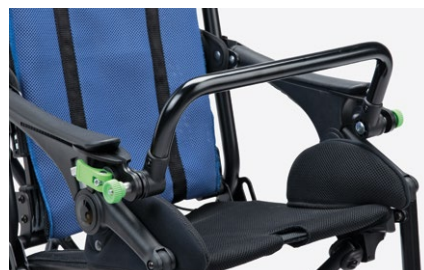

**839 Poggiamani**  
regolabile in inclinazione. Facilmente  
estraibile per la chiusura.



**819 Cappottina**  
elevabile, con borsetta posteriore. Non occorre toglierla. **Si chiude con il telaio.**



NEW




**825 Sacca parapioggia**  
da fissare alla cappottina 819.

NEW




**825B Telino posteriore con  
protezioni laterali.**  
Si fissa facilmente alla cappottina 819  
tramite zip e bottoni automatici, per  
una maggiore protezione dal vento e  
dalla pioggia.

NEW

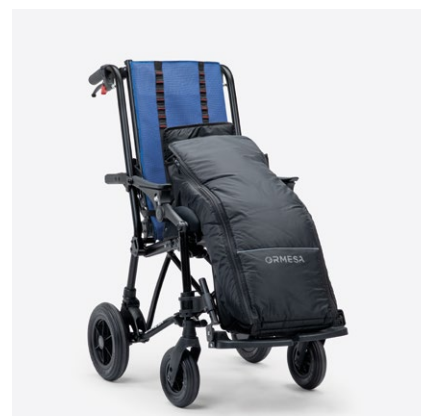

**818 Sacca termica**

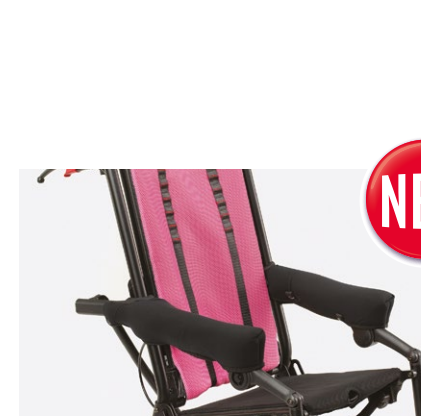

**968 Imbottiture per braccioli**  
facilmente estraibili e lavabili.

NEW



# Componenti



**960 Fermatalloni**



**956 Pedane con regolazione dell'inclinazione**



**858 Cestino portaoggetti**



**812 Direzionatori ruote anteriori**



**844 Imbottiture laterali al telaio.**



**951 Maniglie di spinta regolabili in altezza, senza l'uso di attrezzi!**

Aumenta l'altezza massima di 7 cm (98-105 cm).



**891 Ancoraggi (anelli)**

Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati...)

Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.



# Trollino misure e pesi




**A:** 28 cm con pelotte al bacino imbottite, 32 cm togliendo uno spessore interno, 36 cm senza pelotte al bacino.



Gaia e la sua storia vi aspettano nel sito ufficiale di Ormesa, assieme agli altri protagonisti della nostra fantastica community globale.





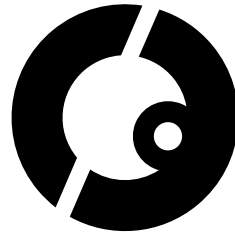

**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno  
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.  
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo  
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
[ISO 13485](#)

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**

