



**ORMESA**<sup>®</sup>  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •







# Emozioni in movimento.

**Birillo** di Ormesa è un **deambulatore per bambini** con disabilità ideato per permettere lo spostamento autonomo in posizione seduta.

La **forma particolare e i colori vivaci** che caratterizzano la **tappezzeria autoestinguente**, rendono Birillo un ausilio divertente e stimolante, oltre che performante dal punto di vista riabilitativo e assistivo.



PRODOTTO  
MARCATO 

BIRILLO è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745

# Su misura per te

## Disponibile in 4 misure

**Birillo** è un ausilio di fondamentale importanza per **l'esplorazione dell'ambiente circostante**, che da spazio visivo e statico, diventa territorio di scoperta e crescita. **Attraverso Birillo, il bambino può arricchire il suo patrimonio di esperienze ed accrescere il proprio repertorio cognitivo e relazionale**, aumentando la consapevolezza del proprio corpo e dello spazio.

Con Birillo, **sicurezza e divertimento vanno di pari passo**. La forma della seduta triangolare dà stabilità al bacino ed al tronco, favorendo una posizione funzionale all'impiego degli arti inferiori e superiori. In questo modo, **Birillo stimola la corretta postura del bambino senza inibire la rotazione del tronco**, favorendo la gestione del movimento attraverso le braccia. La postura corretta previene le deformità e favorisce la generazione di schemi motori, indispensabili per una **interazione ricca e significativa con l'ambiente fisico e sociale**.



Birillo 1



Birillo 2



Birillo 3



Birillo 4




# Caratteristiche tecniche e regolazioni




## Telaio

in acciaio e verniciato con polveri epossidiche atossiche. Regolabile in altezza per una fruibilità perfetta e con sfere di protezione all'estremità superiore delle aste.

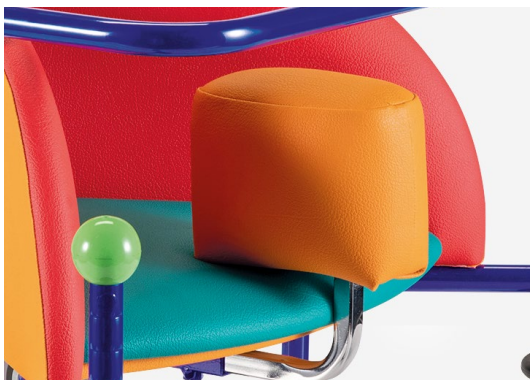

## Divaricatore

regolabile in profondità.

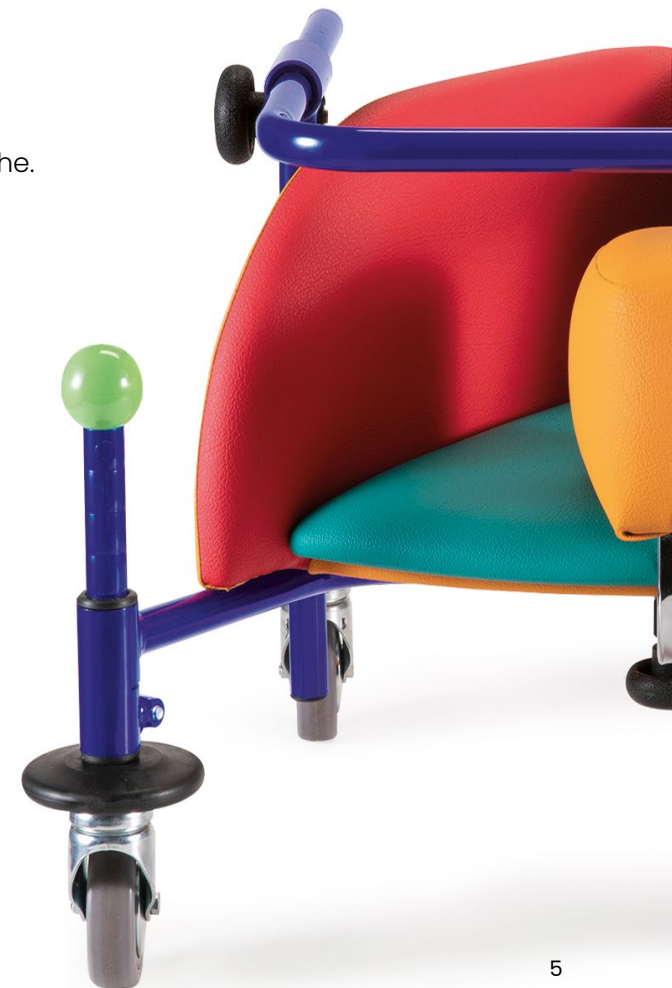



## Seduta triangolare

per contenere il bacino (sedile/schienale con angolazione a 90°). È imbottita e avvolgente, rivestita con materiale plastico resistente all'uso e alla pulizia.



## Ruote


piene piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a sfera. Sono protette da paracolpi elastici salva-muro.



## Manubrio

regolabile in altezza e profondità.

# Componenti

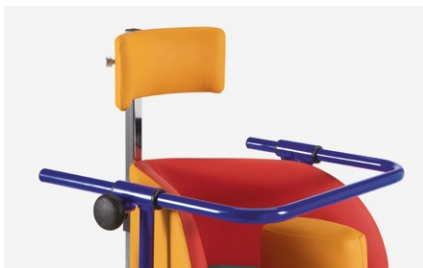

**860 Poggiatesta concavo**  
Regolabile in altezza.



**824 Tavolo trasparente**  
con incavo. Regolabile in profondità.



**812 Direzionatori**  
Agevola il direzionamento del  
deambulatore.



# Birillo **misure e pesi**

A: altezza schienale  
 B: ingombro in larghezza  
 C: ingombro in lunghezza  
 D: altezza suolo-seduta  
 E: altezza suolo-manubrio  
 F: profondità sedile  
 G: larghezza sedile  
 H: altezza utente  
 Ingombro Massimo  
 Peso Ausilio  
 Portata Massima

## misura 1

18 cm  
 59 cm  
 50 cm  
 da 20 a 28 cm  
 da 34 a 48 cm  
 18 cm  
 22 cm  
 da 70 a 95 cm  
 67 cm  
 8,5 kg  
 30 kg

## misura 2





19 cm  
 65 cm  
 51 cm  
 da 23 a 31 cm  
 da 40 a 56 cm  
 20 cm  
 26 cm  
 da 85 a 105 cm  
 73 cm  
 10 kg  
 40 kg

## misura 3

21 cm  
 73 cm  
 59 cm  
 da 23 a 35 cm  
 da 40 a 65 cm  
 23 cm  
 30 cm  
 da 95 a 120 cm  
 81 cm  
 11 kg  
 50 kg

## misura 4

26 cm  
 78 cm  
 60 cm  
 da 22 a 40 cm  
 da 43 a 74 cm  
 30 cm  
 38 cm  
 da 110 a 140 cm  
 89 cm  
 12,8 kg  
 60 kg

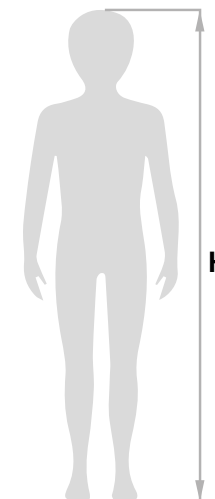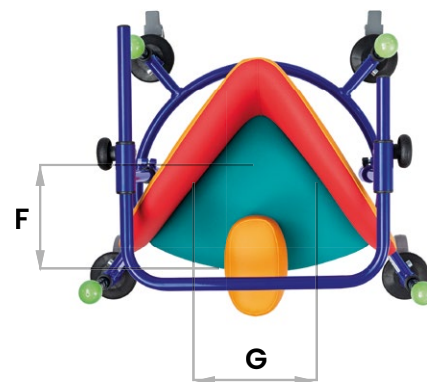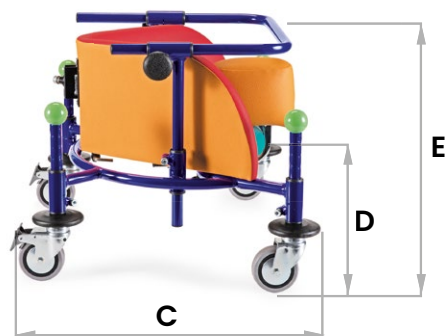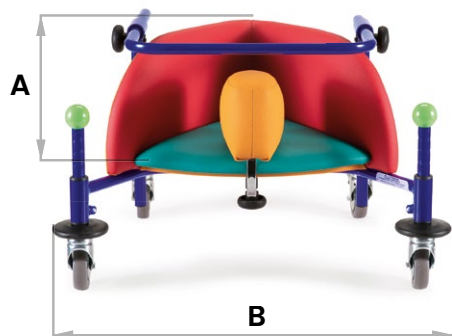






Il piacere  
della  
scoperta





Divertirsi  
in  
sicurezza

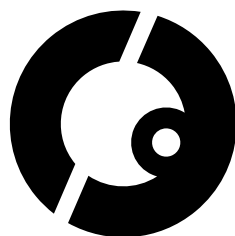

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
[ISO 13485](#)

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**

